

Rekonditioneringsanvisning

Model No. 814789

Art. No.105063R-B, 2023-03-08

Vi rekommenderar att kontroll enligt rekonditioneringsanvisning utförs regelbundet. Frekvensen beror på hur ofta gåbordet används och vilken påfrestning det har utsatts för.

Gåbordet kan rengöras med en fuktig trasa och milda hushållsrengöringsmedel. Avspolning/rinnande vätskor bör undvikas på grund av elmotorn. Ta bort batteriet från gåbordet innan rengöringsprocessen börjar. Använd inte slipmedel, ång- eller högtryckstvättar. Rengöring måste göras manuellt utan mekaniska apparater (t.ex. ultraljudsrengörare eller desinfektionsmaskin). Låt gåbordet torka i rumstemperatur före användning. Förvara inte gåbordet under 0 °C innan det är helt torrt. Vid vatteninträngning måste produkten sluta användas.

Desinficera genom att torka av tillgängliga ytor med desinfektionsmedel. Desinfektion får endast utföras av behörig personal och genom att bära tillräcklig skyddsutrustning. Ytan ska rengöras med ett desinfektionsmedel som innehåller 70–80 % etanol. Vi avråder från desinfektionsmedel som innehåller klor eller fenol. Undvik rinnande vätskor och ta bort batteriet från gåbordet innan du desinficerar gåbordet. Låt gåbordet lufttorka i rumstemperatur före användning tills det inte finns mer ytlig fukt på produkten.

Rekonditionering skall endast ske av personal som har god kännedom om hur arbetet ska utföras. En felaktig rekonditionering eller desinfektion kan resultera i en olycka. Vid oklarheter kontakta alltid leverantör eller återförsäljare.

Följande punkter ska kontrolleras innan återanvändning:

- | | |
|--|---|
| <p>☐ Armstöd</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att armstödsbreddning fungerar.• Kontrollera att armstöd är hela och rena. <p>☐ Handtag</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att handtagsinställning fungerar.• Kontrollera att grepp inte är skadade eller smutsiga. <p>☐ Rörstomme och ram</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att inga mekaniska skador finns.• Kontrollera att skruvar och bultar är ordentligt åtdragna. <p>☐ Höjdjustering</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att höjdjustering fungerar och att höjdjusteringsknappen inte är skadad.• Kontrollera att elställdonet löper mjukt och med konstant hastighet samt att batteriefästet inte sitter löst.• Kontrollera att gåbordet känns stabilt vid maxinställning. <p>☐ Batteri</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att batteriet är rent och har installerats korrekt.• Kontrollera att alla kontakter och kablar sitter ordentligt på plats.• Kontrollera att ställdon, batteri och styrbox ej sitter löst. | <p>☐ Hjul</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att hjul rullar lätt samt att slitbanan ej är skadad.• Kontrollera att länkhjulen svänger lätt och att bromsen låser länkhjulen. <p>☐ Bromsar</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera bromseffekt och justera eventuellt bromsvajrar vid behov.• Kontrollera att bromshandtag och vajrar ej är skadade eller slitna. <p>☐ Allmänt</p> <ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att gåbordet känns stumt och glappfritt.• Kontrollera att gåbordet inte skramlar vid manövrering.• Kontrollera att gåbordet inte är smutsigt och att alla hjul är i kontakt med underlaget när gåbordet står plant. <p>☐ Provkörning</p> <p>Gör en slutlig kontroll genom en provkörning.</p> |
|--|---|

Modell: _____

Serienummer: _____

Ägare: _____

Åtgärdad av: _____

Ort och datum: _____

Anmärkningar/Anteckningar:

Sprängskiss 814789 TOPRO Taurus E Premium

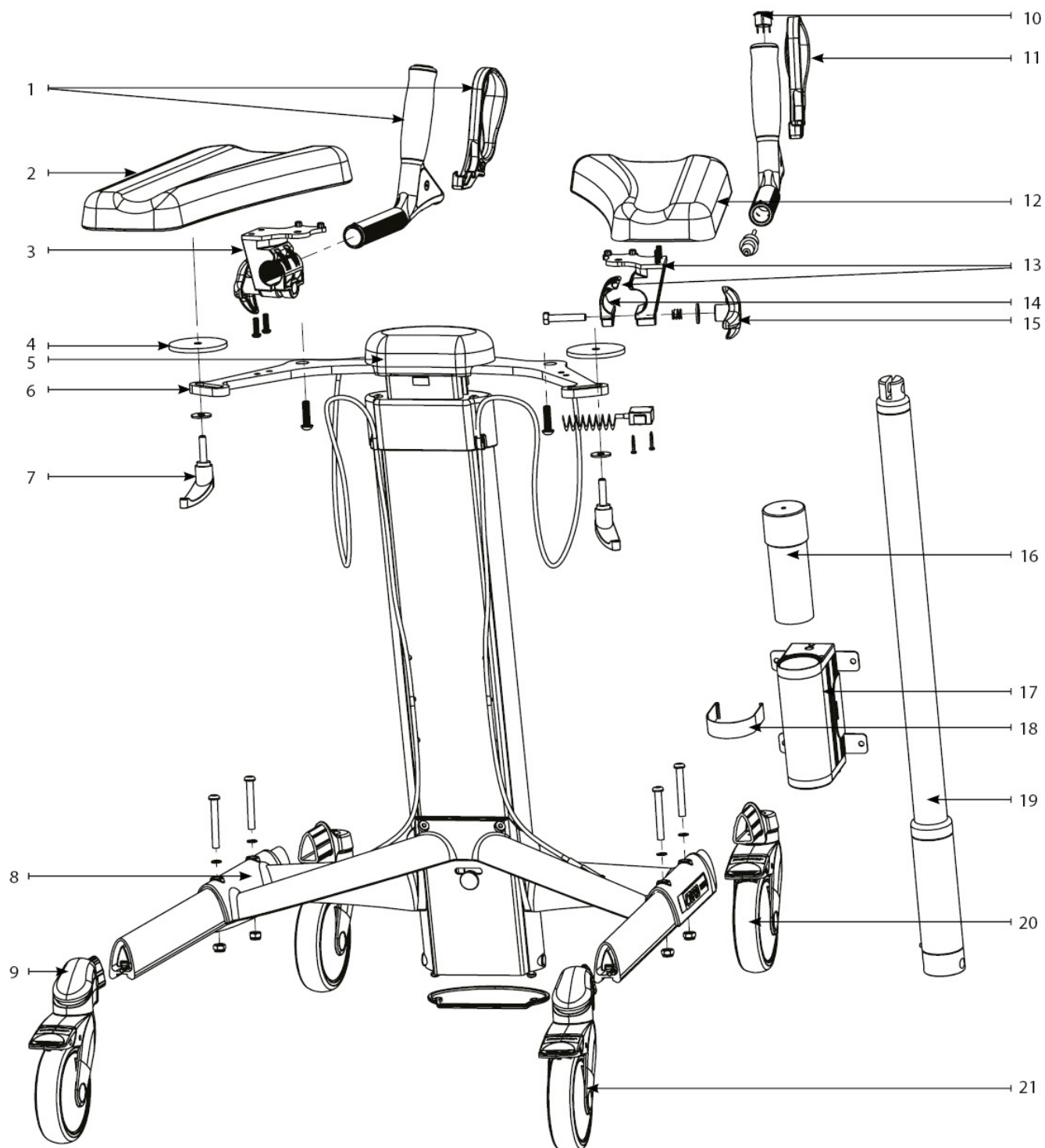


Fig. nr.	Art. nr.	Artikelbenämning/beskrivning
1	815217	Handtag komplett
2	814804	Armdyna, vänster
3	815218	Klämma för handtak, komplett, vänster
4	716924	Bricka för armstöd
5	814837	Mittendyna
6	716913	Armstödsplatta
7	814802	Låsspak för armdyna
8	814817	Tvärbalk
9	815225	Lock för bakhjul
10	814816	Brytare
11	815232	Bromshandtag
12	814803	Armdyna, höger
13	815219	Klämma för handtak, komplett, höger
14	815224	Klämma för handtag
15	815223	Låsratt för handtag
16	814266	Batteri, Concens
17	814267	Kontrollbox, Concens
18	814271	Fäste för kontrollbox, Concens
19	814268	Ställdon, Concens
20	814848	Framhjul
21	815222	Bakhjul
	102560	Kabel batteriladdare EU, Concens
	814265	Batteriladdare, Concens