


TOPRO Taurus H

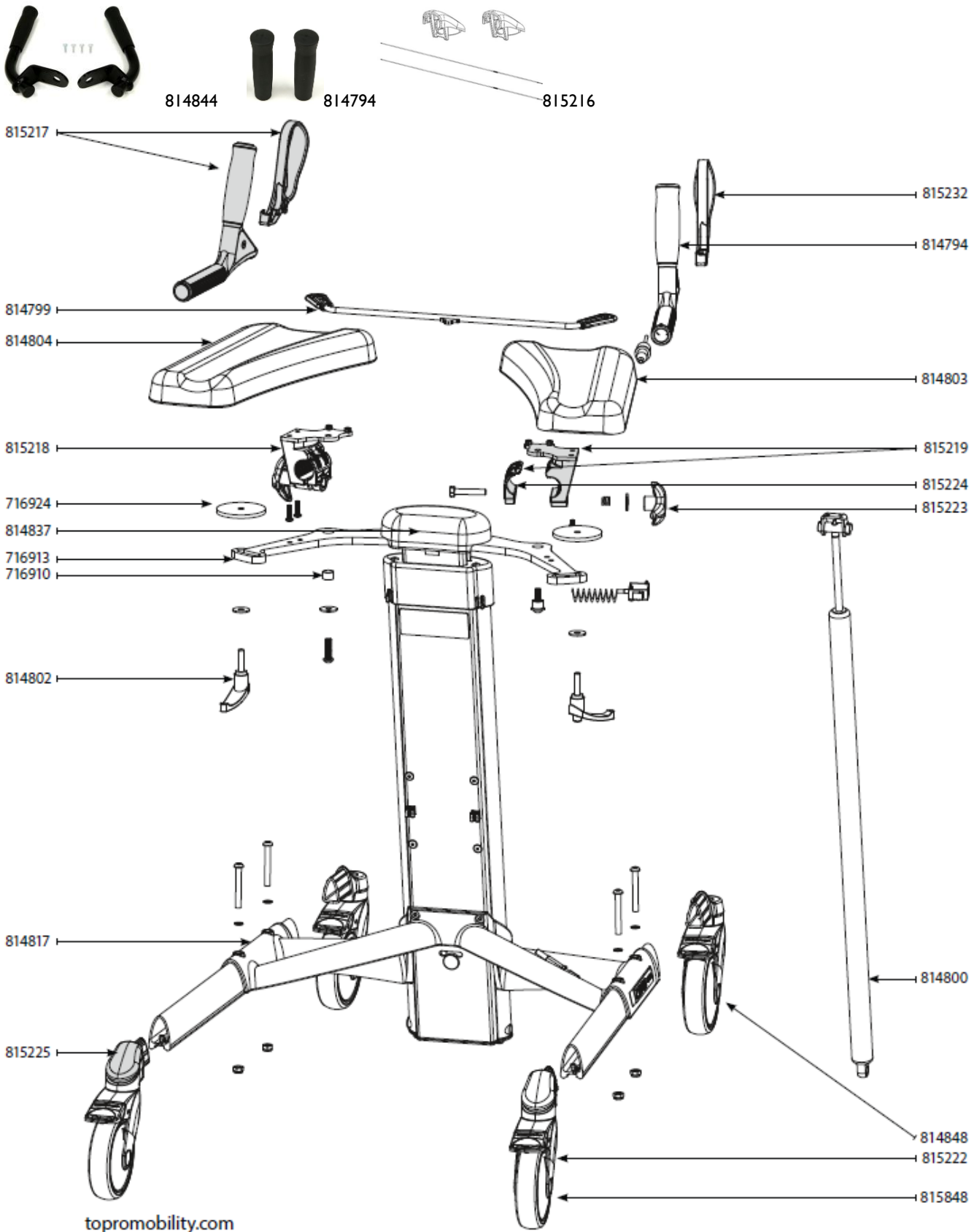

Model No. 814785/ 87
Rev. 002 2026



Model No. 814785/ 87
Rev. 002 2026

Article No.	Product description EN	Product description DE
716910	Spacer for armrest bracket	Abstandhalter für Armauflagenhalterung
814804	Armpad, left, Taurus	Armauflage, li, Taurus
814803	Armpad, right, Taurus	Armauflage, re, Taurus
716913	Forearm support plate, Taurus	Armauflagenplatte, Taurus
814799	Releaser for lift function	Auslöser für Liftfunktion, komplett
815232	Brake lever, RH/LH	Bremshebel, re/li
815216	Brake wire incl. rear wheel cover, Taurus	Bremsseil inkl. Abdeckung Hinterrad (ab Modell Dez 2019), Taurus
814800	Gas spring Taurus	Gasfeder Taurus
815217	Handle complete, short, Walker X, with brake, RH/LH	Handgriff kpl., kurz, Walker X (ab 06/2018) mit Bremse re/li
815218	Clamp for handle, complete, left	Klemme für Handgriff, komplett, links
815219	Clamp for handle, complete, right	Klemme für Handgriff, komplett, rechts
815224	Clamp handles, Taurus/Walker with hand brake	Klammer Handgriffe, Taurus / Walker mit Handbremse
814837	Center cushion, Taurus	Mittelpolster, Taurus
814817	Crossbeam incl. screws & rivets, Taurus	Querbalken inkl. Schrauben & Nieten, Taurus
815222	Wheel Ø125, rear wheel with brake, Taurus	Rad, Taurus d=125, Hinterrad für Handbremse, inkl. Niete (ab Modell Dez 2019), Taurus
815225	Wheel cover (from Dec 2019), Taurus	Radabdeckung (ab Modell Dez 2019), Taurus
814848	Wheel, Taurus Ø125 not for hand brake (from 2010)	Rad, Taurus d=125 nicht für Handbremse (ab Modell 2010)
815848	Wheels Ø125 mm, with brake, Taurus, 2 pcs	Räder Ø125mm, m.Bremse, Taurus Modell 2010 bis Dez. 2019, 2 Stk
814802	Lock handle, Taurus	Schliesshebel, Taurus
716924	Forearm support ring , Taurus	Unterlegscheibe Armauflage, Taurus
815223	Closing wheel Taurus/Walker forearm support	Verschlussrad Taurus/Walker Armauflage
814844	Fixed handles, Taurus H/E without hand brake, 2 pcs	fixierte Handgriffe, Taurus H/E ohne Handbremse, 2 Stk
814794	Handle cover Taurus, 2 pcs	Handgriffüberzug Taurus (bis Modell Dez. 2019), 2 Stk