


TOPRO Troja 5G



Model No. 814600, 814601
Rev.001 2026

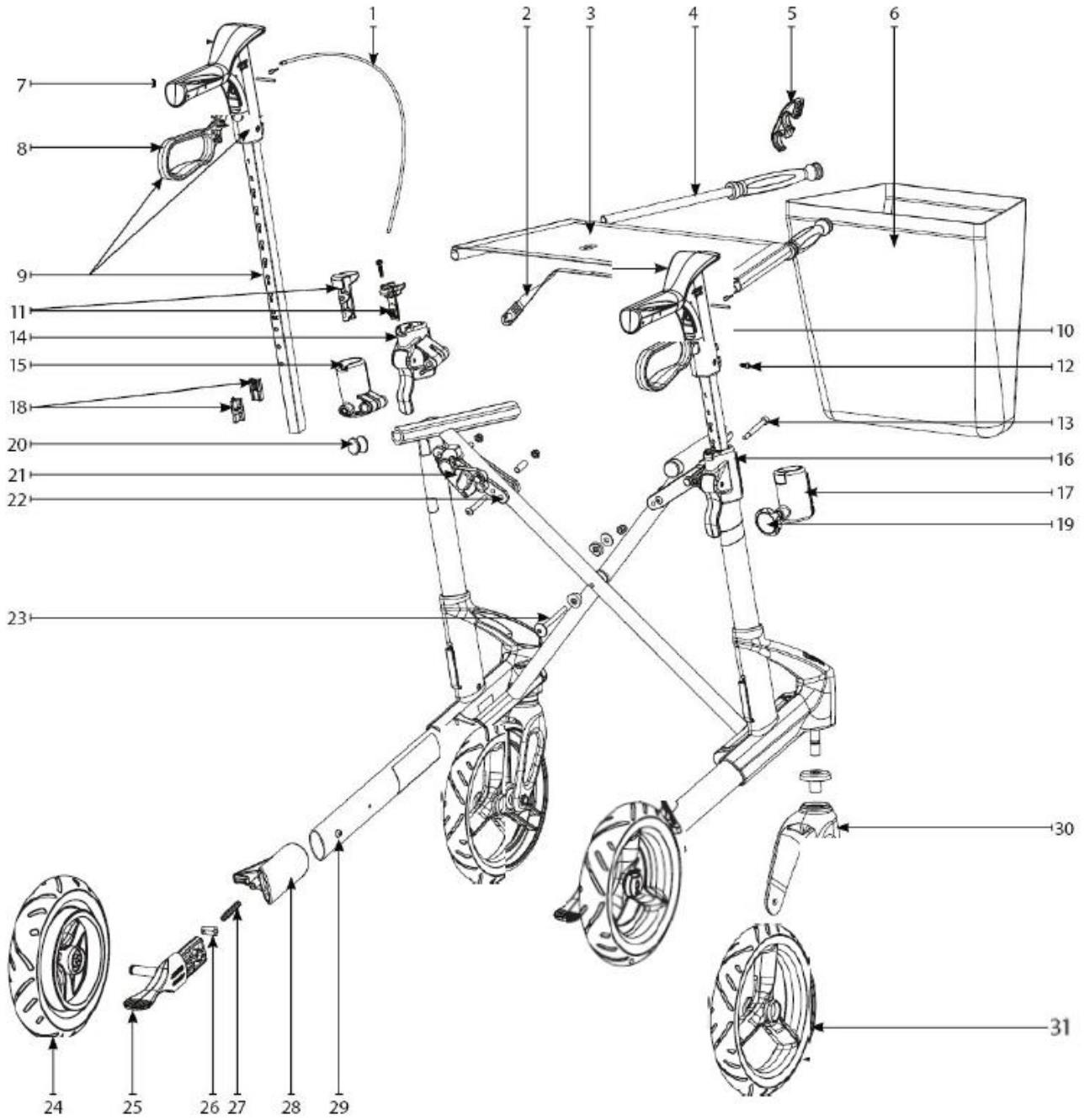



Model No. 814600, 814601
Rev.001 2026

Fig. nr.	Art. nr.	Article description/ Artikelbeschreibung
1	814665	Bremsseil, 2G/ 5G/Neuro/Odysse, M/S, schwarz, 1 Stk/ Brake wire, 2G/5G/Neuro/Odysse, M/S, black, 1 pc
2	814150	Zugband Sitznetz (ab 2019)/ Seat release cord (from 2019)
3	814759	Sitznetz Troja S/M/ Seat net Troja S/M
4	814791	Befestigungsstange Sitz/Korb, alle Modelle/ Bracket seat/basket, all models
5	815310	Sicherungsbügel Troja alle Modelle/ Transport lock Troja all models
6	815936	Einkaufstasche, 5G, M/S, schwarz, 1 Stk / Bag, 5G, M/S, black, 1 pcs
7	815311	ErgoGrip, Auflage, 2 Stk / ErgoGrip, pad, 2 pcs
8	815232	Bremshebel, re/li, alle Modelle/ Brake lever, RH/LH, all models
9	Komplett Handgriff im Auslauf 2025/ complete handles phase out 2025	
10	Komplett Handgriff im Auslauf 2025/ complete handles phase out 2025	

Fig. nr.	Art. nr.	Artikelbenämning/beskrivning
11	815383	Befestigung für Handgriff, 5G/Original, grau, 25mm 1 Stk/ Handle fastener, 5G/Original, grey, 25 mm, 1pc
	815938	Befestigungselement Höhenverstellung mit Schnellverschluss, Original_5G, schwarz, 2 Stk/ Mounting element height adjustment, Org/5G, 2 pcs
12	Universalschraube, erhältlich im Baumarkt	Schraube/ Screw DIN7981 TORX PAN CZ C4,2x13 T20
13	Universalschraube, erhältlich im Baumarkt	Schraube/ Screw INSEKS SH 8.8 EL M6X65
14	816034	Höhenverstellung Schnellverschluss, Original/5G, li/re, schwarz, 2 Stk/ Height adjustment quick release, Org/5G, 2 pcs
15	815335	Griffaufnahme, grau, li, 5G/ Grip mount, grey, left, 5G
16	816034	Höhenverstellung Schnellverschluss, Original/5G, li/re, schwarz, 2 Stk/ Height adjustment quick release, Org/5G, 2 pcs
17	815334	Griffaufnahme, grau, re, 5G/ Grip mount, grey, right, 5G
18	816050	Memory-Clip/ Memory Clip
19	815892	Verschlussrad mit Reflektoren, ATR/ATR Slim M/5G/Pegasus/ Locking wheel, ATR/ATR Slim M/5G/Pegasus
20	815269	Befestigung Sitz, hinten, 2 Stk/ Seat stopper, rear, 2 pcs
21	814727	Verschlussicherung, alle Modelle, 2 Stk/ Locking device, all models, 2 pcs
22	815840	Parallelschienen Feststellvorrichtung, Troja/ Parallel bar folding mech, Troja M/S
23	Universalschraube, erhältlich im Baumarkt	Schraube/ Screw, M6 × 60 mm
24	815904	Softrad, hinten, 2G/5G/Pegasus, schwarz, 2 Stk/ Soft wheel rear, 2G/5G/Pegasus, black, 2 pcs
25	815914	Ankipphilfe, Original/5G/Walker2, ATR/ATR Slim, schwarz, 2 Stk/ Tipping aid, black, 2 pcs
26	716520	Befestigungsbolzen Bremsseil/ Fastening bolt brake wire
27	Fig.Nr.1	Bremsfeder nicht einzeln, enthalten in Porsition 1/ Brake spring not sold separately, included in position 1
28	815907	Bremsklotz, 2G/5G/ATR, schwarz, 2 Stk/ Brake block, 2G/5G/ATR, black, 2 pcs
29	Universalschraube, erhältlich im Baumarkt	Schraube/ Screw, M6 × 20 mm
30	815947	Vorderradgabel, links/rechts, 5G, schwarz, 2 Stk/ Front fork, LH/RH, 5G, black, 2 pcs
31	815903	Softrad, vorne, 2G/5G, schwarz, 2 Stk/ Soft wheel front, 2G/5G, black, 2 pcs

Räder/ wheels

Neues Design/ new design	Altes Design/ old design
	

Neue Höhenverstellung start 10.2025/ new high adjustment

