

TOPRO Olympos ATR



Model No. 814300, 814305, 814320
Rev.003 2026

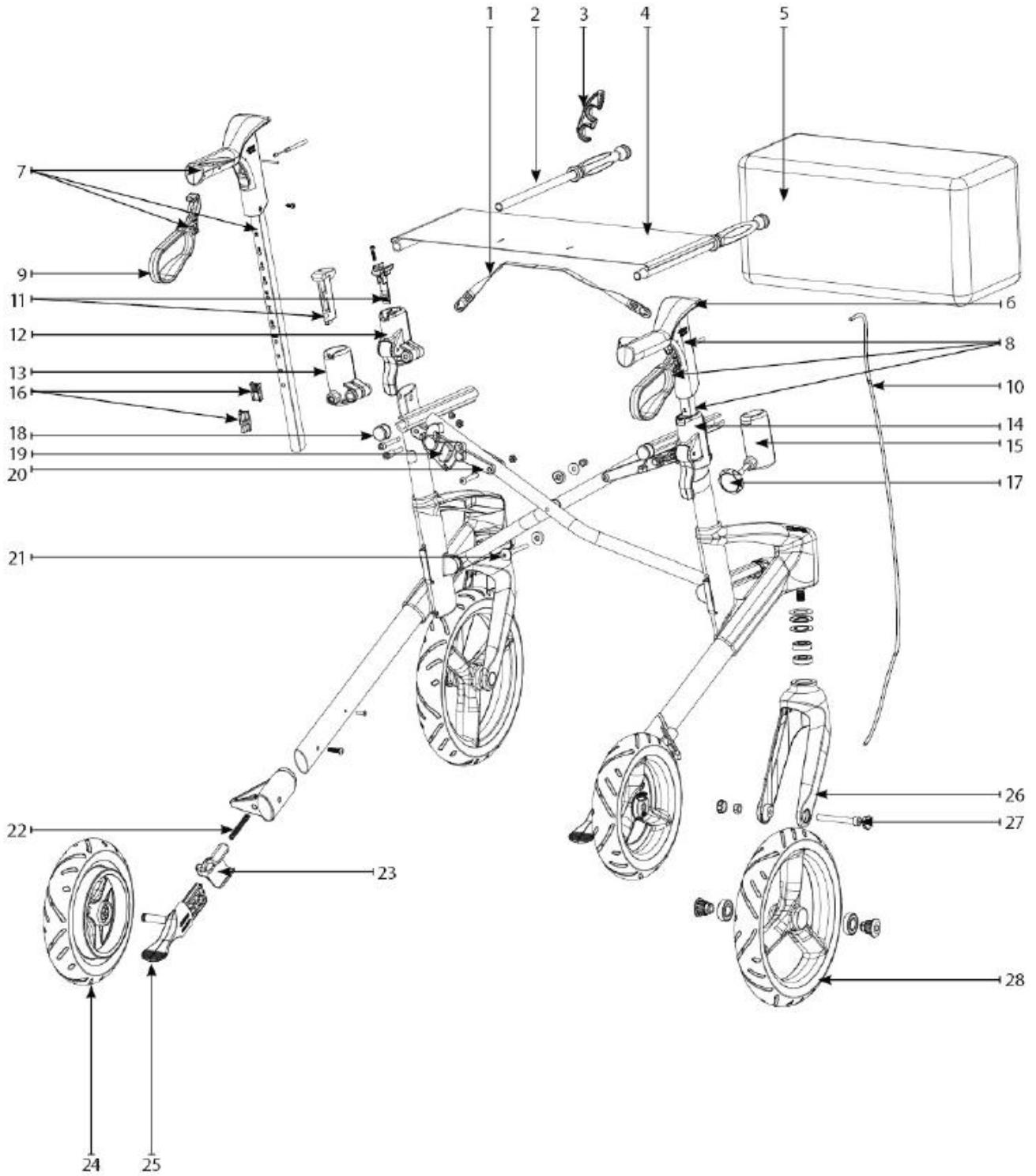


Fig. nr.	Art. nr.	Article description/ Artikelbeschreibung
1	814150	Seat release cord 814300, 814305/ Zugband Sitznetz (ab 2019)
	814151	Seat release cord 814320 ATR Slim M/ Zugband Sitznetz, (ab 2019)/ATR Slim M
2	814791	Bracket seat/basket/ Befestigungsstange Sitz/Korb, alle Modelle
	815888	Seat bracket short wo bag/ Befestigungsstange kurz ohne Tasche
3	815310	Transport lock/ Sicherungsbügel,
4	814066	Seat net, ATR, M (from 2015 also for S)/ Sitznetz, ATR, M (ab 2015 auch für Modell S)
	815838	Seat net (model 814320)/ Sitznetz, Größe M Slim
5	815932	Bag, ATR, M/S, black 1 pcs/ Einkaufstasche, ATR, M/S, schwarz, 1 Stk
	815934	Bag, ATR Slim, M/S, black, 1 pcs/ Einkaufstasche, ATR Slim, M/S, schwarz, 1 Stk
6	815311	ErgoGrip, pad, 2 pcs/ ErgoGrip, Auflage, 2 Stk
7/ 8	Complete handles phase out in 2025/ Kompletthandgriffe ausgelaufen in 2025	
9	815232	Brake lever, RH/LH, all models/ Bremshebel, re/li, alle Modelle
10	814664	Brake wire, Olympos/ATR Slim, M/S, black, 1 pc/ Bremsseil, Olympos/ATR Slim, M/S, schwarz, 1 Stk
11	815389	Handle fastener, ATR, grey, 25 mm/ Befestigung für Handgriff, ATR , grau, 25mm
	815940	Mounting element height adjustment, ATR, 2 pcs/ Befestigungselement Höhenverstellung mit Schnellverschluss, ATR, schwarz, 2 Stk
12/ 14	815948	Height adjustment quick release, ATR, 2 pcs/ Höhenverstellung Schnellverschluss, ATR, schwarz, 2 Stk
13	815337	Grip mount, grey, left, ATR Griffaufnahme, grau,li, ATR
15	815336	Grip mount, grey, right, ATR Griffaufnahme, grau, re, ATR
16	816050	Memory Clip
17	815892	Locking wheel/ Verschlussrad mit Reflektoren
18	815269	Seat stopper, rear, 2 pcs/ Befestigung Sitz, hinten, 2 Stk
19	814727	Locking device, all models/ Verschlussicherung, alle Modelle
20	716818	Parallel bar folding mech, ATR M/ Parallelschienen, ATR, M
	815830	Parallel bar folding mech, ATR M Slim/ Parallelschiene, ATR, M, Slim
21	Universalschraube, erhältlich im Baumarkt	Screw/ Schraube M6 x 6 l
22	Fig.Nr. I	Bremsfeder nicht einzeln, enthalten in Porsition I/ Brake spring not sold separately, included in position I
23	815907	Brake block, 2G/5G/ATR, black, 2 pcs/ Bremsklotz, 2G/5G/ATR, schwarz, 2 Stk
24	815902	Offroad wheel rear, ATR, black, 2 pcs/ Offroadrad, hinten, ATR, schwarz, 2 Stk

Fig. nr.	Art. nr.	Article description/ Artikelbeschreibung
----------	----------	--

Model No. 814300, 814305, 814320
Rev.003 2026

25	815914	Tipping aid, black, 2 pcs/ Ankipphilfe, Original/5G/Walker2, ATR/ATR Slim, schwarz, 2 Stk
26	815901	Front fork, ATR, black, 2 pcs/ Vorderradgabel, ATR, schwarz, 2 Stk
27	Universalschraube, erhältlich im Baumarkt	Screw/ Schraube INSEKS SH 8.8 M8 X 65 EL
28	815949	Offroad wheel front, ATR, black, 2 pcs/ Offroadrad, vorne, ATR, schwarz, 2 Stk

Neue Höhenverstellung start 10.2025/ new high adjustment

