


Model No. 815400, 815410, 815420/ 814750, 814770, 814740
Rev.003 2026



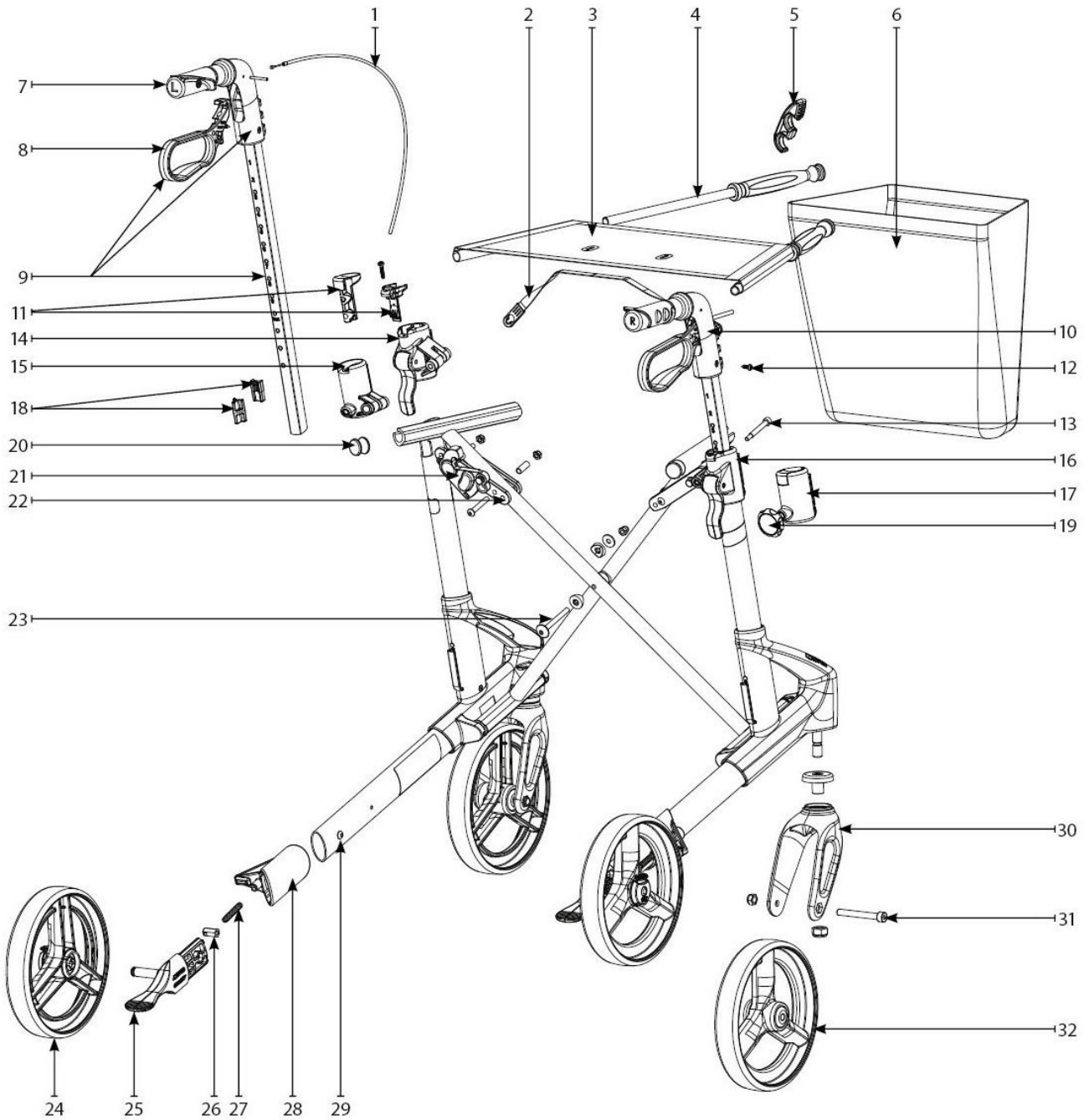

Model No. 815400, 815410, 815420/ 814750, 814770, 814740
Rev.003 2026

Fig. nr.	Art. nr.	Article description/ Artikelbeschreibung
1	814792	Brake cable, Original/Classic, M/S, black, 1 pc/ Bremsseil, Original/Classic, M/S, schwarz, 1 Stk
	814131	Bremsseil, Classic/X, schwarz, 1 Stk/ Brake wire, Classic/X, black, 1 pc
2	814150	Zugband Sitznetz (ab 2019)/ Seat release cord (from 2019)
	814151	Zugband Sitznetz, Classic/X (ab 2019)/ATR Slim M/ / Seat release cord, Classic/X(from 2019)/ATR Slim M
3	814759	Sitznetz Troja S/M/2G/ Seat net Troja S/M/2G
	814134	Sitznetz Troja X/ Seat net Troja X
4	814791	Befestigungsstange Sitz/Korb, alle Modelle/ Bracket seat/basket, all models
5	815310	Sicherungsbügel Troja alle Modelle/ Transport lock Troja all models
6	815237	Einkaufsnetz, Troja S/M Modelle mit Festellrad / Shopping net, Troja S/M models with Locking wheel
	816032	Einkaufsnetz Black Series, Original, M/S / Shopping net Black Series, Original, M/S
	816033	Einkaufsnetz Black Series, Original, X/ Shopping net Black Series, Original, X
7	814680	Handgriffüberzug anatomisch, paar/ Anatomical handle cover, pair
8	815232	Bremshebel, re/li, alle Modelle/ Brake lever, RH/LH, all models
9	Komplett Handgriff im Auslauf 2025/ complete handles phase out 2025	
10	Komplett Handgriff im Auslauf 2025/ complete handles phase out 2025	

Fig. nr.	Art. nr.	Artikelbenämning/beskrivning
11	815383	Befestigung für Handgriff, 5G/Original, grau, 25mm 1 Stk/ Handle fastener, 5G/Original, grey, 25 mm, 1pc
	815938	Befestigungselement Höhenverstellung mit Schnellverschluss, Original_5G, schwarz, 2 Stk/ Mounting element height adjustment, Org/5G, 2 pcs
12	Universalschraube, erhältlich im Baumarkt	Schraube/ Screw DIN7981 TORX PAN CZ C4,2x13 T20
13	Universalschraube, erhältlich im Baumarkt	Schraube/ Screw INSEKS SH 8.8 EL M6X65
14	815946	Höhenverstellung Schnellverschluss, Original/5G, li/re, schwarz, 2 Stk/ Height adjustment quick release, Org/5G, 2 pcs
15	815335	Griffaufnahme, grau, li, 5G/ Grip mount, grey, left, 5G
16	815948	Höhenverstellung Schnellverschluss, Original/5G, li/re, schwarz, 2 Stk/ Height adjustment quick release, Org/5G, 2 pcs
17	815334	Griffaufnahme, grau, re, 5G/ Grip mount, grey, right, 5G
18	816050	Memory-Clip / Memory Clip
19	815892	Verschlussrad mit Reflektoren, ATR/ATR Slim M/5G/Pegasus/ Locking wheel, ATR/ATR Slim M/5G/Pegasus
20	815269	Befestigung Sitz, hinten, 2 Stk/ Seat stopper, rear, 2 pcs
21	814727	Verschlussicherung, alle Modelle, 2 Stk/ Locking device, all models, 2 pcs
22	815840	Parallelschienen Feststellvorrichtung, Troja/ Parallel bar folding mech, Troja M/S
23	Universalschraube, erhältlich im Baumarkt	Schraube/ Screw, M6 × 60 mm
24	815906	Standardrad, hinten, Original/Classic, schwarz, 2 Stk/ Standard wheel, Original/Classic, black, 2 pcs
25	815914	Ankipphilfe, Original/5G/Walker2, ATR/ATR Slim, schwarz, 2 Stk/ Tipping aid, black, 2 pcs
26	716520	Befestigungsbolzen Bremsseil/ Fastening bolt brake wire
27	Fig.Nr.1	Bremsefeder nicht einzeln, enthalten in Porsition 1/ Brake spring not sold separately, included in position 1
28	815909	Bremsklotz, Original/Walker, schwarz, 2 Stk/ Brake block, Original/Walker, black, 2 pcs
29	Universalschraube, erhältlich im Baumarkt	Schraube/ Screw, M6 × 20 mm
30	815911	Vorderradgabel, Original/Walker2, schwarz, 2 Stk/ Front fork, Original/Walker2, black, 2 pcs
31	Universalschraube, erhältlich im Baumarkt	Schraube/ Screw INSEKS SH 8.8 M8 X 65 EL
32	815905	Standardrad, vorne, Original/Classic, schwarz, 2 Stk/ Standard wheel, Original/Classic, black, 2 pcs

Räder/ wheels

Neues Design/ new design	Altes Design/ old design
	

Neue Höhenverstellung start 10.2025/ new high adjustment

