

TOPRO Troja Walker2



Model No. 815430, 815440, 815450
Rev.003 2026

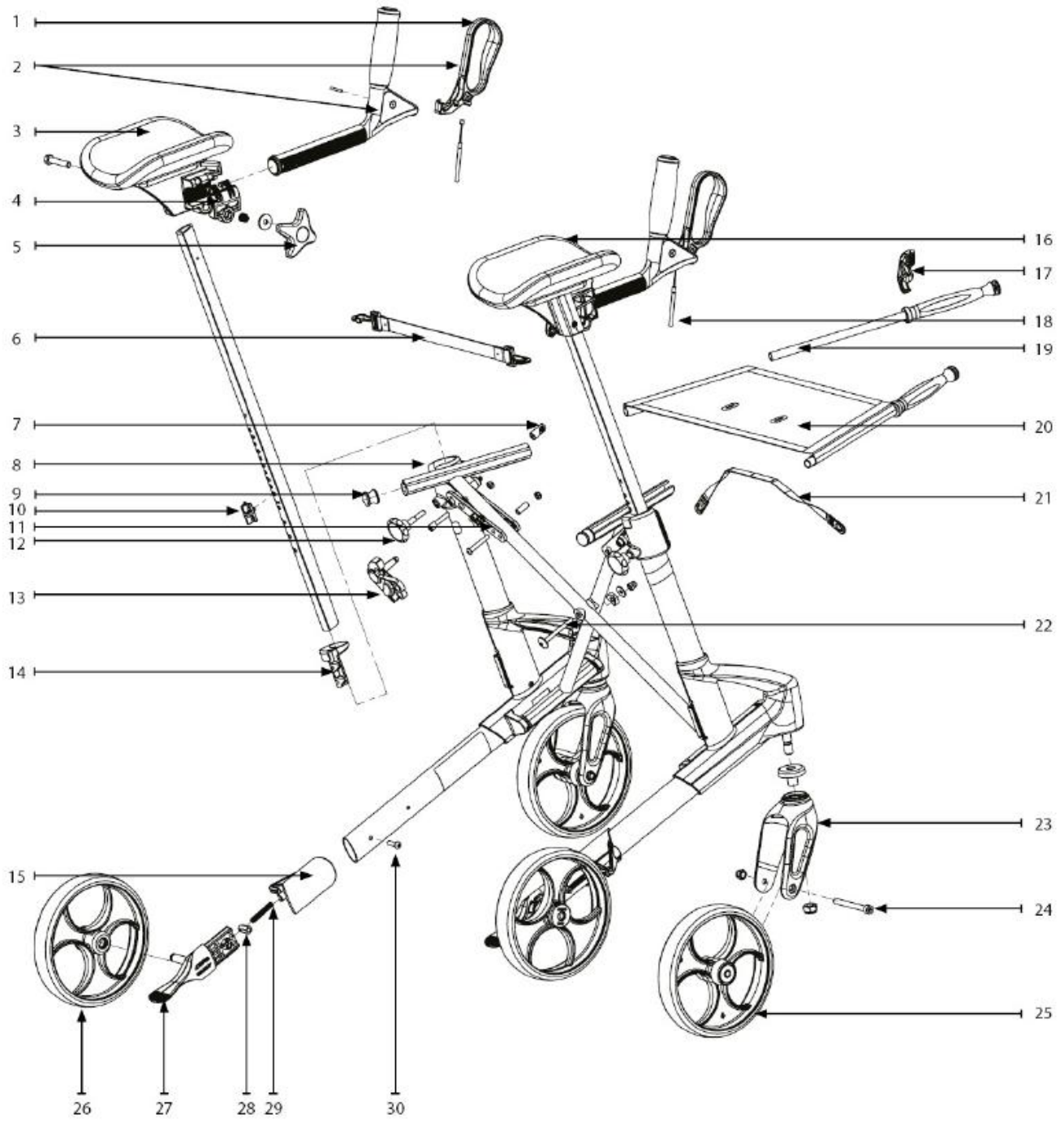





Fig. nr.	Art. nr.	Article description/ Artikelbeschreibung
1	815232	Bremshebel, re/li/ Brake lever, RH/LH
2	815229	Handgriff mit Bremse re/li, Classic UA, M/S/ Handle with brake, ri/le, Classic UA, M/S
	815217	Handgriff kpl., kurz, Walker X (ab 06/2018) mit Bremse re/li/ Handle complete, short, Walker X, with brake, RH/LH
3	815910	Armstuetzen, Walker2, 2 Stk/ Armrests Walker2, 2pcs
4	815224	Klammer Handgriffe, Taurus / Walker mit Handbremse/ Clamp handles, Taurus/Walker with hand brake
5	815223	Verschlussrad Taurus/Walker Armauflage/ Closing wheel Taurus/Walker forearm support
6	814017	Verbindungsgurt, Walker2, M/S, 1 Stk/ Connecting strap, Walker2, M/S, 1 pc
7	Universal, erhältlich im Baumarkt	Ringmutter M6/ Ringnut M6
8	815335	Griffaufnahme, grau, links/ Grip mount, grey, left
	815334	Griffaufnahme, grau, re/ Grip mount, grey, righ
9	815269	Befestigung Sitz, hinten, 2 Stk/ Seat stopper, rear, 2 pcs
10	816050	Memory-Clip
11	815840	Parallelschienen, Parallel bar M/S
12	815892	Verschlussrad mit Reflektoren/ Locking wheel
13	814727	Verschlussicherung, alle Modelle / Locking device, all models
14	815383	Befestigung für Handgriff, 5G/Original, grau, 25mm/ Handle fastener, 5G/Original, grey, 25 mm
15	815340	Bremsklotz Original/Walker2/ Brake pad, Original/Walker2
16	815910	Armstuetzen, Walker2, 2 Stk/ Armrests Walker2, 2pcs
17	815310	Sicherungsbügel/ Transport lock
18	814020	Bremsseil, Walker, M, 2 Stk / Brake wire, Walker, M, 2 pcs
	814137	Bremsseil, Walker S/X / Brake wire, Walker, S/X, 2 pcs
19	814791	Befestigungsstange Sitz/Korb, alle Modelle / Bracket seat/basket, all models
20	814759	Sitznetz Troja S/M / Seat net Troja S/M

Fig. nr.	Art. nr.	Article description/ Artikelbeschreibung
21	814150	Zugband Sitznetz (ab 2019)/ Seat release cord (from 2019)
	814151	Zugband Sitznetz, Classic/X (ab 2019)/ Seat release cord, Classic/X(from 2019)
22	103244	Schraube/ Screw, M6 × 60 mm
23	815911	Vorderradgabel, Original/Walker2, schwarz, 2 Stk/ Front fork, Original/Walker2, black, 2 pcs
24	Universalschraube, erhältlich im Baumarkt	Schraube/ Screw INSEKS SH 8.8 M8 X 65 EL
25	815905	Standardrad, vorne, Original/Classic, schwarz, 2 Stk/ Standard wheel, Original/Classic, black, 2 pcs
26	815906	Standardrad, hinten, Original/Classic, schwarz, 2 Stk/ Standard wheel, Original/Classic, black, 2 pcs
27	815914	Ankipphilfe schwarz, 2 Stk/ Tipping aid, black, 2 pcs
28	716520	Befestigungsbolzen Bremsseil/ Fastening bolt brake wire
29	Fig.nr. 18	Bremsfeder nicht einzeln, enthalten in Porsition I/ Brake spring not sold separately, included in position I
30	Universalschraube, erhältlich im Baumarkt	Schraube/ Screw, M6 × 20 mm

	Neues/ new design	Altes/ old design	
Vorn/ front			
Hinten/ backside	